

FRUCT-O-TEST

FINALIDADE:

Solução de frutose para realização de Teste de Intolerância à Frutose, que tem como objetivo o diagnóstico da frutosemia.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

A frutosemia é uma doença metabólica causada pela ausência da enzima frutose-1-fosfato aldolase. É uma herança autossômica recessiva. A má absorção da frutose pode ser desenvolvida por alguns indivíduos, quando a concentração de frutose em um alimento encontra-se em excesso à concentração de glicose.

O diagnóstico da frutosemia pode ser feito por teste de hidrogênio expirado ou teste de absorção da frutose.

No teste de hidrogênio expirado, uma carga oral de 25 gr de frutose é administrada ao paciente e mede-se os níveis de hidrogênio expirado em intervalos especificados.

APRESENTAÇÃO:

Frasco com 25 gr em 250 mL sabor laranja.

COMPOSIÇÃO:

Frutose, acidulante ácido cítrico (INS330), aromatizante idêntico ao natural (FII), benzoato de sódio.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Manter entre 2 - 30°C, ao abrigo da luz. Verifique o prazo de validade na embalagem. Não utilize produtos com a validade vencida.

PRECAUÇÕES:

- Os cuidados habituais de biossegurança devem ser aplicados na manipulação do produto.
- Somente para uso diagnóstico "in vitro".

TÉCNICA DE USO:

- Teste de hidrogênio expirado:

1. Tomar amostra de ar expirado basal;
2. Administrar a dose de Fruct-o-test;
3. Medir os níveis de hidrogênio expirado nos intervalos indicados pelo fabricante do equipamento.

CONTROLE DE QUALIDADE:

- Antes do uso, inspecionar os frascos individualmente, verificando se não existem irregularidades.
- Como medidas de controle da qualidade, devem ser seguidas as dispostas para o doseamento da glicose sérica.

BIBLIOGRAFIA:

- Stanley S. Raphael: *Lynch: Técnicas de laboratório*; 1986.
- Lima O. A.; Soares J.B; Greco J.B. Galizzi; Cançado J.R: *Métodos de laboratório aplicados à clínica*; 1992.
- Diabetes Mellitus. Informe de un grupo de la OMS. Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 1985.
- Diagnosis and classification of Diabetes Mellitus. *Diabetes Care* 2012, 35(supp 1):S64:S71. ADA.
- The American Journal of Gastroenterology: North America Breath Test Consensus; May 2017; vol. 112.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefax: (32) 3331-4489

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO

Elaborado e fabricado por:

RENYLAB QUIM. FARM. LTDA

Rodovia BR 040 Km 697 - Caiçaras

Barbacena – MG CEP:36205-666

Farm. Resp.: Renê Vaz de Mello CRF – MG: 2709

Revisão: janeiro 2019

MS: 80002670087