

FRUCT-O-TEST

Teste oral de Tolerância à Frutose

FINALIDADE:

Solução de frutose para realização de Teste Oral de Tolerância à Frutose, que tem como objetivo o diagnóstico de intolerância ao açúcar.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

O fundamento do teste consiste na dosagem da glicemia após sobrecarga com 25g de frutose por via oral, para avaliar se ela está sendo metabolizada.

APRESENTAÇÃO:

Frasco 250 mL sabor laranja.

COMPOSIÇÃO:

Frutose, acidulante ácido cítrico (INS330), aromatizante idêntico ao natural (FII), corante (INS110), conservante.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Manter em temperatura 2°- 30°C ao abrigo da luz. Verifique o prazo de validade na embalagem. Não utilize produtos com a validade vencida.

PRECAUÇÕES:

- Os cuidados habituais de biossegurança devem ser aplicados na manipulação do produto.
- Somente para uso diagnóstico "in vitro".

TÉCNICA DE USO:

1. O teste deve ser realizado pela manhã com o paciente em jejum de 8 – 14 horas.
2. O paciente deve evitar a realização de atividades físicas no dia anterior ao teste.
4. Coletar a amostra de sangue em jejum.
5. Administrar a dose de Frut-O-Test:
6. Coletar as amostras de sangue nos intervalos indicados;
 - Adultos e crianças: após 2 horas;

CONTROLE DE QUALIDADE:

- Antes do uso, inspecionar os frascos individualmente, verificando se não existem irregularidades.
- Como medidas de controle da qualidade, devem ser seguidas as dispostas para o doseamento da glicose sérica.

ADVERTÊNCIA:

- Esse produto não deve ser consumido por pessoas com intolerância ao corante amarelo crepúsculo e ao ácido acetilsalicílico.

BIBLIOGRAFIA:

- Stanley S. Raphael: *Lynch: Técnicas de laboratório*; 1986.
- Lima O. A.; Soares J.B; Greco J.B. Galizzi; Cançado J.R: *Métodos de laboratório aplicados à clínica*; 1992.
- Diabetes Mellitus. Informe de un grupo de la OMS. Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 1985.
- Diagnosis and classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2012, 35(supp 1):S64:S71. ADA.
- Standardization of the Oral Glucose Tolerance Test. Report of the Committee on Statistics of the American Diabetes Association. June, 14. 1968.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefax: (32) 3331-4489

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO

Elaborado e fabricado por:

RENYLAB QUIM. FARM. LTDA

Rodovia BR 040 Km 697 - Caiçaras

Barbacena – MG CEP:36205-666

Farm. Resp.: Renê Vaz de Mello CRF – MG: 2709

Revisão: junho 2017

MS: 80002670087